

- Sorgenfreie Langzeitverhütung
- Hohe Sicherheit
- Hormonfrei


DIE GOLDSPIRALE

GOLDT[®]



GOLDENE ZEITEN für die
moderne Frau von heute

GOLDENE ZEITEN für die
moderne Frau von heute

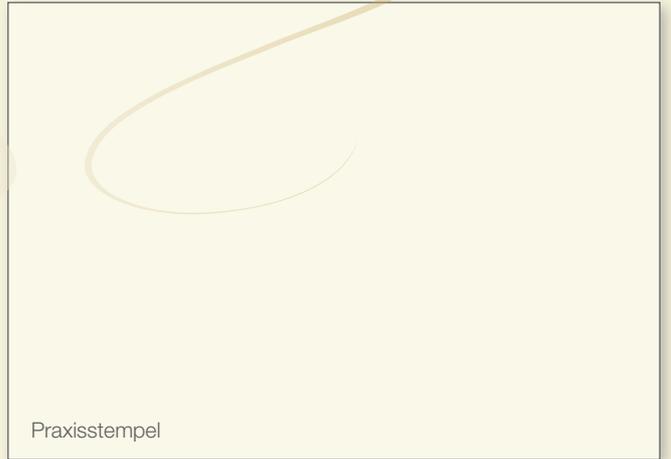

Praxisstempel


ANGELINI
www.angelini.at

GO-002-177/1/260917

GOLDENE ZEITEN für die
moderne Frau von heute

DIE GOLDSPIRALE

GOLDT[®]



GOLDENE ZEITEN für die moderne Frau von heute



Was ist Gold T®?

Gold T® ist eine **effektive, hormonfreie** Methode zur langjährigen Schwangerschaftsverhütung mit guter Verträglichkeit.

Gold T® besteht aus einem T-förmigen Kunststoffträger, um den ein feiner Kupferdraht mit Goldkern gewickelt ist, der durch das Freisetzen von Kupferionen eine sichere Verhütung bietet.

Wie wirkt Gold T®?

Gold ist besonders beständig und dies macht sich die Goldspirale zu Nutze. Die **Gold T®** - eine hormonfreie Goldspirale - vereint die Edelmetalle Kupfer und Gold und schafft damit die besten Voraussetzungen für eine sichere Langzeitverhütung. Das Kupfer verhindert die Beweglichkeit der Spermien und die Einnistung der Eizelle. Das Herz der **Gold T®**, der Goldkern, verhindert die vorzeitige Korrosion des Kupferdrahtes und sorgt so für eine längere Haltbarkeit.

Wie sicher ist Gold T®?

Die Goldspirale zählt zu den zuverlässigsten hormonfreien Verhütungsmethoden, mit einem Pearl Index von 0,7. 2 x im Jahr wird eine Kontrolle bei Ihrer Gynäkologin/Ihrem Gynäkologen empfohlen. Die empfohlene Liegedauer und verhütende Wirkung beträgt 5 Jahre.

Für wen ist Gold T® geeignet?

Gold T® eignet sich für alle Frauen, die

- hormonfrei verhüten möchten
- durch den Einfluss von Hormonen Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, erhöhtes Risiko für Thrombosen, depressive Verstimmungen, Akne oder Gewichtszunahme befürchten



- sich eine zuverlässige Langzeitverhütung wünschen
- nicht täglich an Verhütung denken möchten
- in nächster Zeit keine Schwangerschaft planen oder die Familienplanung abgeschlossen haben
- eine Alternative zur Sterilisation suchen

Entscheidend ist und bleibt das persönliche Gespräch mit Ihrer Gynäkologin/Ihrem Gynäkologen, ob die **Gold T®** Spirale für Sie geeignet ist.

Welche Vorteile hat Gold T®?

Die Goldspirale kann für einen Zeitraum von 5 Jahren in der Gebärmutter verbleiben.

Der Goldkern schützt den Kupferdraht vor Oxidation und vermindert dadurch das Risiko, dass der Kupferdraht bei längerer Liegedauer brüchig wird.

Die Goldspirale ist hormonfrei.

Welche Nebenwirkungen können unter anderem auftreten?

Blutungen: Während der ersten Zyklen können die Monatsblutungen intensiver und langanhaltender als gewohnt sein. Während der ersten Monate können gelegentliche Blutungen zwischen den Perioden auftreten.

Beckeninfektion: Entzündung sofort behandeln und Spirale entfernen.

Weitere Informationen zur **Gold T®** finden Sie unter www.gold-spirale.at.

GoldT[®]



GoldT[®]